


# Veterinært Laboratorium, Kjellerup

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., Vinkelvej 13, DK 8620 Kjellerup  
+45 3339 4950 | CVR 25529529 | labkjellerup@lf.dk | labkjellerup.dk

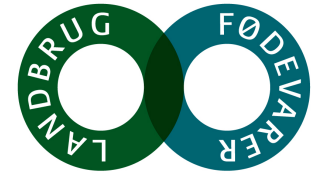

## Anbefaling af opbevaring og forsendelse af prøver til PRRS-undersøgelse ved PCR

Prøvemateriale	Opbevaring	Forsendelse
Oral Fluid - OF (Spyt)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stilles på køl (4-8°C) hurtigst muligt</li><li>• Undgå stuetemperatur og frost</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sendes på køl hurtigst muligt</li><li>• Sendes senest 5 dage efter udtagelsen</li></ul>
Testikler/haler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Testikler/haler anbringes på frost (-20°C) straks efter udtagelsen</li><li>• Undgå stuetemperatur</li><li>• Der må være højst 10 kuld/pose</li><li>• Kan opbevares 30 dage på frost</li><li>• Kan kun sendes til Veterinært Laboratorium, Kjellerup</li><li>• Der tages gebyr for prøvehåndtering</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sendes på køl eller godt isoleret  </li></ul>
Processing fluid - PF (Væske fra testikler/haler)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stilles på køl hurtigst muligt</li><li>• Undgå stuetemperatur og frost</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sendes på køl</li><li>• Sendes senest en dag efter udtagelsen</li></ul>

Reference: SEGES INNOVATION nr. 2217 Notat udgivet 12. december 2022